



D-24184-2015

## MITARBEITER UND INVESTITIONEN SICHER SCHÜTZEN

Mitarbeiter, die unter dem Einfluss von Medikamenten und illegalen Drogen stehen, werden nicht nur zur Gefahr für sich selbst. Sie erhöhen das Risiko für Unfälle, bei denen andere Personen oder Maschinen involviert sein könnten. Im Zweifel wird sogar die Existenz des gesamten Unternehmens aufs Spiel gesetzt. Schon niedrige Konzentrationen können zu unvorhersehbaren Wirkungen führen und damit die Leistungsfähigkeit und die Umsicht einschränken.

Regelmäßige Kontrollen führen zu einem sicheren Arbeitsplatz und helfen, die Risiken von illegalem Substanzmissbrauch zu reduzieren.

**Mit dem Dräger DrugCheck® 3000 wissen Sie in kürzester Zeit, ob jemand aktuell unter Drogen- einfluss steht. Der kompakte Drogenschnelltest auf Speichelbasis liefert Ihnen unkompliziert und kostengünstig verlässliche Testergebnisse vor Ort. Das Gerät im Hosentaschenformat braucht keinen Strom und ist daher überall einsetzbar.**

**Unternehmenszentrale**  
 Drägerwerk AG & Co. KGaA  
 Moislinger Allee 53–55  
 23558 Lübeck, Deutschland

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**DEUTSCHLAND**  
 Dräger Safety AG & Co. KGaA  
 Revalstraße 1  
 23560 Lübeck  
 Tel +49 451 882-0  
 Fax +49 451 882-2080  
[info@draeger.com](mailto:info@draeger.com)

**ÖSTERREICH**  
 Dräger Austria GmbH  
 Perfektastraße 67  
 1230 Wien  
 Tel +43 1 609 36 02  
 Fax +43 1 699 62 42  
[office.austria@draeger.com](mailto:office.austria@draeger.com)

**SCHWEIZ**  
 Dräger Schweiz AG  
 Waldeggstrasse 30  
 3097 Liebefeld  
 Tel +41 58 748 74 74  
 Fax +41 58 748 74 01  
[info.ch@draeger.com](mailto:info.ch@draeger.com)

Ihren Ansprechpartner vor  
 Ort finden Sie unter:  
[www.draeger.com/kontakt](http://www.draeger.com/kontakt)



D-24202-2015

## Dräger DrugCheck® 3000 Der kompakte Drogenschnelltest

Anwendung am Arbeitsplatz

90 72 000 | 17.08.2 | HQ | PP | Änderungen vorbehalten | © 2017 Drägerwerk AG & Co. KGaA

Dräger DrugCheck® 3000

# Sicher. Sauber. Schnell.

Der kompakte Drogenschnelltest.



## DIE PROBENAHEME: EINFACH, SICHER UND SAUBER

Der DrugCheck® 3000 besteht aus einem Probennehmer für das Sammeln einer Speichelprobe und einer Testkassette für die Analyse. Das Einweg-Test-Kit ist kompakt, manipulationssicher und hygienisch in der Anwendung. Da es ohne elektrische Hilfsmittel auskommt, können Sie es mobil einsetzen und gefahrlos in explosionsgeschützten Bereichen verwenden.

## DIE AUSWERTUNG: SCHNELL UND SENSITIV

Mit dem DrugCheck 3000 testen Sie die Probanden auf bis zu sechs Substanzklassen gleichzeitig: Kokain, Opiate, Amphetamin, Methamphetamine, Benzodiazepine und Cannabis (THC). Der Test erfolgt in drei einfachen Schritten: Speichelprobe sammeln, Test-Kit schütteln und nach kurzer Wartezeit den Test starten. Die Testergebnisse können Sie in der Regel bereits nach zwei Minuten ablesen. Zum Nachweis von Cannabis (THC) als besonders schwierig nachzuweisendem Wirkstoff erlaubt der DrugCheck 3000 – je nach gewählter Wartezeit – zwei Messoptionen: schnell oder sensitiv.

## IHRE VORTEILE: AUF EINEN BLICK

- empfindliche Drogendetektion in kürzester Zeit
- auf Speichelbasis – nicht invasiv
- gleichzeitiger Nachweis von bis zu sechs der häufigsten Substanzklassen – dabei zwei Messoptionen für THC
- äußerst hygienisch und manipulationssicher
- besonders einfach in der Anwendung
- kompaktes Hosentaschenformat
- keine elektronischen Hilfsmittel oder Stromversorgung erforderlich
- überall und jederzeit einsetzbar
- 100 % bewährte Dräger-Technologie



Dräger DrugCheck® 3000  
**Sicher. Sauber. Schnell.**  
Der kompakte Drogenschnelltest.