



## UNBERECHENBARE GEFAHREN LAUERN ÜBERALL: KONTROLLEN KÖNNEN LEBEN RETTEN.

In Ihrem beruflichen Alltag als Ordnungshüter sind Sie den unterschiedlichsten Situationen ausgesetzt, in denen insbesondere Drogen eine immer wichtigere Rolle spielen. Menschen, die unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen, können schnell zur Gefahr werden. Für sich, aber auch für ihre Umwelt. Vor allem im Straßenverkehr gehört neben Alkohol auch zunehmend der Missbrauch von Medikamenten und Drogen am Steuer zur häufigsten Unfallursache.

Effektive Kontrollen direkt vor Ort liefern Ihnen eine feste Handhabe, Substanzmissbrauch zu erkennen und Drogensünder aus dem Verkehr zu ziehen – wann immer und wo immer von Nöten.

**Mit dem Dräger DrugCheck® 3000 wissen Sie in kürzester Zeit, ob jemand aktuell unter Drogeneinfluss steht. Der kompakte Drogenschnelltest auf Speichelbasis liefert Ihnen unkompliziert verlässliche Testergebnisse vor Ort. Das Gerät im Hosentaschenformat braucht keinen Strom und ist daher überall einsetzbar.**

**Unternehmenszentrale**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Deutschland

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

### DEUTSCHLAND

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Revalstraße 1  
23560 Lübeck  
Tel +49 451 882-0  
Fax +49 451 882-2080  
[info@draeger.com](mailto:info@draeger.com)

### ÖSTERREICH

Dräger Austria GmbH  
Perfektastraße 67  
1230 Wien  
Tel +43 1 609 36 02  
Fax +43 1 699 62 42  
[office.austria@draeger.com](mailto:office.austria@draeger.com)

### SCHWEIZ

Dräger Schweiz AG  
Waldeggstrasse 30  
3097 Liebefeld  
Tel +41 58 748 74 74  
Fax +41 58 748 74 01  
[info.ch@draeger.com](mailto:info.ch@draeger.com)

Ihren Ansprechpartner vor  
Ort finden Sie unter:  
[www.draeger.com/kontakt](http://www.draeger.com/kontakt)



**Dräger DrugCheck® 3000**  
**Der kompakte Drogenschnelltest**  
Anwendung bei Polizei, Zoll,  
Strafvollzug und Haft

Dräger DrugCheck® 3000

# Sicher. Sauber. Schnell.

Der kompakte Drogenschnelltest.



## DIE PROBENNAHME: EINFACH, SICHER UND SAUBER

Der Dräger DrugCheck® 3000 setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: einem Probennehmer für das Sammeln einer Speichelprobe und einer Testkassette für die Analyse. An Kontroll- und Testlinien lässt sich hier das Ergebnis ohne Mühe ablesen. Das Einweg-Test-Kit ist kompakt, manipulationssicher und hygienisch in der Anwendung.

## DIE AUSWERTUNG: SCHNELL UND SENSITIV

Mit dem DrugCheck 3000 testen Sie die Probanden auf bis zu sechs Substanzklassen gleichzeitig: Kokain, Opiate, Amphetamin, Methamphetamine, Benzodiazepine und Cannabis (THC). Der Test erfolgt in drei einfachen Schritten: Speichelprobe sammeln, Test-Kit schütteln und nach kurzer Vorinkubationszeit den Test starten. Die Testergebnisse können Sie in der Regel bereits nach zwei Minuten ablesen. Für den besonders schwierig nachzuweisenden Wirkstoff von Cannabis (THC) erlaubt der DrugCheck 3000 – je nach gewählter Vorinkubationszeit – zwei Messoptionen: schnell mit einem höheren oder sensitiv mit einem niedrigen THC Grenzwert.

## IHRE VORTEILE: AUF EINEN BLICK

- verlässlicher Drogenschnelltest in kürzester Zeit
- auf Speichelbasis – nicht invasiv
- qualitativer Nachweis von bis zu sechs der häufigsten Substanzklassen gleichzeitig. Dabei zwei Messoptionen für THC: schnell oder sensitiv
- äußerst hygienisch und manipulationssicher
- besonders einfach in der Anwendung
- kompakt, leicht, handlich
- überall und jederzeit einsetzbar
- 100% bewährte Dräger-Technologie



Dräger DrugCheck® 3000  
**Sicher. Sauber. Schnell.**  
Der kompakte Drogenschnelltest.