

## Dräger DrugCheck® 3000 Drogennachweissystem

Mit dem Dräger DrugCheck® 3000 wissen Sie umgehend, ob jemand erst kürzlich Drogen konsumiert hat und möglicherweise unter deren Einfluss steht. Der kompakte Drogenschnelltest auf Speichelbasis liefert Ihnen unkompliziert und kostengünstig hygienisch Testergebnisse. Dieser Drogentester braucht keinen Strom und ist daher überall einsetzbar.



## Produktvorteile

---

### Einfach und sicher anzuwendender Drogentester

Der Dräger DrugCheck 3000 setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: einem Probennehmer für das Sammeln einer Speichelprobe und einer Testkassette für die Analyse. Die Testkassette enthält die Pufferflüssigkeit und den Sichtbereich mit zwei Teststreifen, auf denen die Kontroll- und Testlinien erscheinen. Der Drogentest erfolgt in drei einfachen Schritten: Speichelprobe sammeln, Test-Kit schütteln und nach kurzer Vorinkubationszeit den Test starten. Ein Farbindikator am Probennehmer entfärbt sich, sobald dieser ausreichend Speichel für das Drogenscreening aufgenommen hat.

Sobald die Kontrolllinien im Sichtbereich erscheinen, können Sie die Ergebnisse ablesen. Bei einem negativen Testergebnis erscheint eine Linie neben der jeweiligen Substanzklasse (Droge). Das bedeutet, dass in der Probe keine der gesuchten Substanzen detektiert worden ist. Erscheint keine Linie neben einer der Substanzklassen, ist das Ergebnis für diese Substanz positiv.

---

### Schnelle und sensitive Auswertung

Mit dem DrugCheck 3000 Test-Kit testen Sie die Probanden auf bis zu sechs Substanzklassen gleichzeitig: Kokain, Opiate, Amphetamin, Methamphetamine/Designer Drogen (bspw. Ecstasy, MDMA), Benzodiazepine (bspw. in Medikamenten) und Cannabis (THC). Von den aufgeführten Substanzklassen ist Cannabis die am häufigsten konsumierte Droge mit dem am schwierigsten nachzuweisenden Wirkstoff (THC = delta-9-tetrahydrocannabinol). Deshalb wurde der DrugCheck 3000 für den THC Test optimiert und erlaubt nun zwei Messoptionen: Je nach gewählter Wartezeit (Vorinkubation) des Tests eine schnelle Messoption mit einem höheren, oder eine sensitive Messoption mit einem niedrigen THC Grenzwert (Cut-Off). Der gesamte Test dauert lediglich 3 – 5 Minuten.

---

### Klare Drogennachweise vor Ort

Dank seiner kompakten Bauweise im Hosentaschenformat lässt sich der DrugCheck 3000 leicht transportieren. Er ist schnell und unkompliziert einsatzbereit und eignet sich für den flexiblen Gebrauch in vielen Anwendungsbereichen wie bspw. Kontrollen im Straßenverkehr oder auch in sicherheitsrelevanten Arbeitsbereichen. Da das Test-Kit ohne elektrische Teile auskommt, können Sie den Drogenschnelltest gefahrlos in explosionsgeschützten Bereichen verwenden.

---

### Weitere Vorteile

Dräger verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Alkoholmesstechnik und Drogennachweisverfahren. Beim DrugCheck 3000 nutzt Dräger das Testprinzip des bewährten Systems Dräger DrugTest® 5000, das selbst kleinste THC-Mengen zuverlässig nachweist. Das Einweg-Test-Kit DrugCheck 3000 ist manipulationssicher und hygienisch in der Anwendung.

## Produktvorteile

### Dräger DrugCheck® App: Drogenerkennung noch komfortabler und noch effizienter


Scannen, testen, Daten erfassen: So einfach funktioniert mobiles Datalogging per Smartphone. Mit der neuen Dräger DrugCheck® App können Sie Ihre Testergebnisse in wenigen Schritten scannen, auswerten, protokollieren und archivieren.

So besteht die Möglichkeit, nach Videoanleitung sicher durch die Handhabung des DrugCheck 3000 geleitet zu werden, sowie das Testergebnis mit Hilfe der Smartphone Kamera auswerten zu lassen und zur weiteren Verwendung festzuhalten. Zusammen mit den persönlichen Daten der testenden Person und des Probanden mit Datum, Uhrzeit und den geographischen Daten können die Ergebnisse nachhaltig und übersichtlich protokolliert werden. Der Datenspeicher ermöglicht es, die erzeugten Messprotokolle zu einem späteren Zeitpunkt wieder abzurufen. Mit dem Smartphone können die Daten schnell und unkompliziert weitergeleitet werden. So ist es möglich, auf Basis der Messergebnisse auch von entfernten Orten aus Handlungsempfehlungen abzugeben.

Die »Info Area« gibt Ihnen weitergehende Antworten, etwa zur Durchführung eines Drogentests mit dem DrugCheck 3000.

Sie können die DrugCheck App kostenlos für die Betriebssysteme iOS und Android im App Store und im Google Play Store herunterladen. Bitte beachten Sie jeweils die Informationen zur Kompatibilität der App mit den mobilen Endgeräten.

## Details

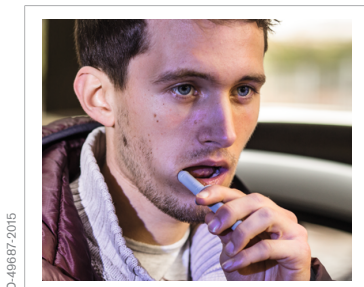

D-49687-2015

1. Sammeln einer Speichelprobe mit dem Probennehmer



D-49707-2015

2. Einstecken des Probennehmers in die trichterförmige Öffnung



D-49724-2015

3. Schütteln des Test-Kits

## Details



4. Testauswertung starten



5. Testergebnisse ablesen



6. Noch effizienter Drogen detektieren:  
Mit der Dräger DrugCheck® App

## Services



### **Dräger DrugCheck® App im App Store / Google Play Store**

Scannen Sie den QR-Code, um direkt auf die Downloadseite der Dräger DrugCheck® App im App Store / Google Play Store zu gelangen.

## Verwandte Produkte



D-54720-2012

### Dräger DrugTest® 5000

Kein Pipettieren, kein Tropfen, kein Zeitstoppen: Mit dem Dräger DrugTest® 5000 ist ein Drogentest einfach und schnell durchgeführt. Sie können Speichelproben sofort automatisch auswerten lassen – für ein zuverlässiges Ergebnis an Ort und Stelle.



D-6296-2009

### Dräger SSK 5000


Das Dräger SSK 5000 dient zur Probenahme von Drogen-Anhaftungen von Oberflächen. In Kombination mit dem Dräger DrugTest 5000-System oder dem Dräger DrugCheck® kann es zur Feststellung einer möglichen Drogen-Kontamination eingesetzt werden. Für weitere Untersuchungen kann die gewonnene Probe als Asservat gelagert und transportiert werden.



ST-13226-2007

### Dräger DCD 5000

Rauschmitteln und Medikamenten einfach, schnell und sicher auf der Spur: Mit dem Dräger DCD 5000 können Sie die Speichelprobe nicht nur ganz leicht sammeln. Sie können sie damit auch lagern und zur Analyse ins Labor schicken – ohne dass die Probe unterwegs verfälscht wird.

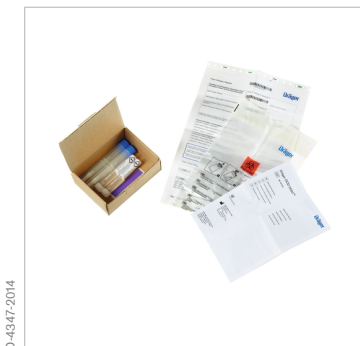

D-4347-2014

### Dräger SCK

Zur Dokumentation und Sicherstellung der Beweiskette nutzen Sie das Bestätigungsset mit Speichelprobennehmer zur nachträglichen Zweit-Probennahme für die Laboranalytik für eine Probe inklusive Versandmaterial.

## Technische Daten

### Test zum Nachweis von Drogen in Speichel

Abmessungen (B x H x T)	32 x 111 x 57 mm
Gewicht	< 30 g
Arbeitsbereich	Betrieb: 5 °C bis 40 °C bei 5 % – 95 % rel. Feuchte
Lagerung und Transport	4 °C bis 25 °C
Dauer einer Messung	schnelle Messung: Auswertung < 3 Minuten sensitive Messung: Auswertung < 5 Minuten
Wahl des Messmodus	Abhängig von der gewählten Vorinkubationszeit und dem gewünschten THC Cut-Off schnelle oder sensitivere Messung.

## Bestellinformationen

Dräger DrugCheck® 3000	Beschreibung	Bestell-Nr.
<b>Test zum Nachweis von Drogen im Speichel</b>		
Dräger DrugCheck® 3000 STK 5-Panel	Packungseinheit 20 Stück	83 25 580
Folgende Substanzen lassen sich mit dem Dräger DrugCheck® 3000 STK 5-Panel nachweisen:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kokain (COC)</li> <li>- Opiate (OPI)</li> <li>- Cannabis (THC)</li> <li>- Amphetamin (AMP)</li> <li>- Methamphetamine (MET)</li> </ul>		
Dräger DrugCheck® 3000 STK 6-Panel	Packungseinheit 20 Stück	83 27 960
Folgende Substanzen lassen sich mit dem Dräger DrugCheck® 3000 STK 6-Panel nachweisen:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kokain (COC)</li> <li>- Opiate (OPI)</li> <li>- Cannabis (THC)</li> <li>- Amphetamin (AMP)</li> <li>- Methamphetamine (MET)</li> <li>- Benzodiazepine (BZO)</li> </ul>		

## Notizen

## Notizen

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.  
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks).

**UNTERNEHMENSZENTRALE**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Deutschland  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**DEUTSCHLAND**  
Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Revalstraße 1  
23560 Lübeck  
Tel +49 451 882-0  
Fax +49 451 882-2080  
[info@draeger.com](mailto:info@draeger.com)

**SCHWEIZ**  
Dräger Schweiz AG  
Waldeggstrasse 30  
3097 Liebefeld  
Tel +41 58 748 74 74  
Fax +41 58 748 74 01  
[info.ch@draeger.com](mailto:info.ch@draeger.com)

**ÖSTERREICH**  
Dräger Austria GmbH  
Perfektastraße 67  
1230 Wien  
Tel +43 1 609 36 02  
Fax +43 1 699 62 42  
[office.austria@draeger.com](mailto:office.austria@draeger.com)

Ihren Ansprechpartner vor  
Ort finden Sie unter:  
[www.draeger.com/kontakt](http://www.draeger.com/kontakt)

